

Studio del caso: Ulcere da pressione sacrali/bilaterali ischiatiche

OASIS[®]
EXTRACELLULAR MATRIX

Paziente	30 anni, diabetico insulino-dipendente. C5-6 quadriplegico incompleto.
Presentazione	Arrivato con ulcere da pressione bilaterali ischiatiche e sacrali centrali. Tutte le ulcere erano in stadio IV, misurazioni come segue: <ul style="list-style-type: none">• Ulcera ischiatica destra: 3 x 7 x 0,1 cm• Ulcera ischiatica sinistra: 2 x 2 x 0,1 cm• Ulcera sacrale centrale: 13 x 8 x 0,5 cm (con indebolimento)
Trattamento Cronologia	Il paziente era originariamente gestito dal servizio medico con medicazioni wet-to-dry seguite da debridement enzimatico. Una volta migliorato lo stato nutrizionale, è stata consultato il reparto chirurgia plastica.

Nota: i risultati individuali possono variare.

Ulcere da pressione bilaterali ischiatiche

Trattamento:

su base settimanale applicazioni di OASIS[®] Wound Matrix. Per il fissaggio sono state utilizzate strisce Steri-Strip[®], unitamente a medicazioni non aderenti, idrogel e medicazioni secondarie.

Risultati:

A 6 settimane, l'ulcera ischiatica sinistra è stata chiusa utilizzando un totale di cinque applicazioni di OASIS.

A 7 settimane, l'ulcera ischiatica destra è stata chiusa utilizzando un totale di sei applicazioni di OASIS.

Giorno 1




Ulcera ischiatica destra prima dell'applicazione di OASIS

Giorno 6



Ulcera ischiatica destra 1 settimana dopo l'applicazione iniziale di OASIS

9 settimane

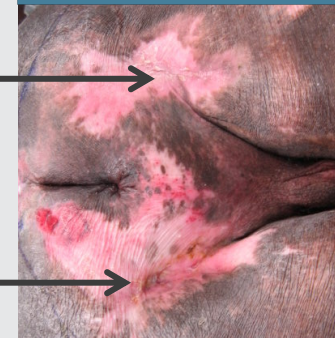

Ulcera ischiatica destra



Ulcera ischiatica sinistra



Ulcere ischiatiche 9 settimane dopo l'applicazione iniziale di OASIS

Nota: i risultati individuali possono variare.

OASIS Wound Matrix è il nome del prodotto negli Stati Uniti.

OASIS Extracellular Matrix è il nome del prodotto al di fuori degli Stati Uniti.

Steri-Strip è un marchio registrato di 3M.

Ulcera da pressione sacrale

Trattamento:

su base settimanale applicazioni di OASIS[®] Wound Matrix. Per il fissaggio sono state utilizzate strisce Steri-Strip[®], unitamente a medicazioni non aderenti, idrogel e medicazioni secondarie.

Risultati:

A 9 settimane, la ferita si è ridotta da 13 x 8 cm (con undermining) a 9 x 6 cm (con undermining).


A questo punto, la lesione del paziente è stata chiusa utilizzando un lembo di avanzamento miocutaneo bilaterale del gluteo.

Giorno 1



Prima dell'applicazione di OASIS

Giorno 1

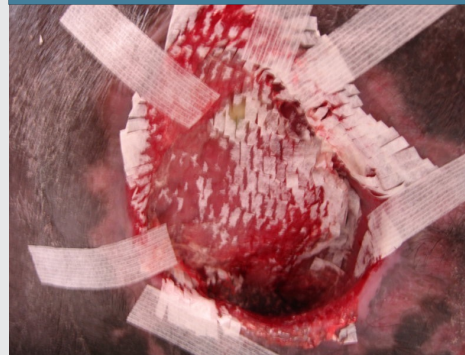

Applicazione iniziale di OASIS

9 settimane



9 settimane dopo l'applicazione iniziale di OASIS, prima della procedura con lembo

Nota: i risultati individuali possono variare.

OASIS Wound Matrix è il nome del prodotto negli Stati Uniti.

OASIS Extracellular Matrix è il nome del prodotto al di fuori degli Stati Uniti.

Steri-Strip è un marchio registrato di 3M.