

# Studio del caso: lesione traumatica alla caviglia

OASIS<sup>®</sup>  
EXTRACELLULAR MATRIX

<b>Paziente</b>	Donna di 70 anni investita da un autobus, con conseguente ferita ampia, traumatica e aperta alla caviglia
<b>Presentazione</b>	Arrivata con una grande quantità di pelle necrotica con ematoma sottostante e grande difetto di tessuto molle
<b>Trattamento Cronologia</b>	Ammessa all'ospedale per una settimana e poi trasferita al centro di cura delle ferite. La frattura composta è stata trattata con un tutore CAM <sup>®</sup> Walker .  CAM Walker è un marchio registrato di Alimed Inc .

Nota: i risultati individuali possono variare.

# Caso: lesione traumatica alla caviglia

Contribuito di Dr. Kazu Suzuki, DPM CWS, Los Angeles, California,  
United States

## Visita iniziale



## Trattamento:

**Visita iniziale al centro di cura delle ferite:** ferita alla caviglia bloccata con iniezione di lidocaina. Sbrigliamento con tagliente eseguito per asportare la pelle necrotica ed evacuare l'ematoma. Ferita ulteriormente sbrigliata e irrigata con Qoustic Wound Therapy System™, macchina per debridement a ultrasuoni. Ferita ricoperta con Mepilex® Ag Foam Dressing e avvolta in Profore® Multi-Layer Compression Wrap .

**Una settimana dopo la visita iniziale:** ferita sbrigliata chirurgicamente e irrigata con ultrasuoni. V.A.C.® Therapy iniziata e continuata per 4 settimane fino a quando la dimensione e la profondità della ferita sono diminuite, con tessuto di granulazione rosso sano.

## Giorno 0



**Applicazione iniziale di OASIS® Wound Matrix (Giorno 0):** il tessuto di granulazione riempiva la base della ferita. La V.A.C. Therapy è stata interrotta. Iniziata applicazione di OASIS e ricoperta con Mepilex Ag Foam Dressing e Profore Multi-Layer Compression Wrap. OASIS è stata continuata su base settimanale per sette settimane.

Qoustic Wound Therapy System è un marchio registrato di Arobella Medical, LLC.

Mepilex è un marchio registrato di Mölnlycke Health Care AB.

Profore è un marchio registrato di Smith & Nephew.

V.A.C è un marchio registrato di KCI.

Nota: i risultati individuali possono variare.

OASIS Wound Matrix è il nome del prodotto negli Stati Uniti.

OASIS Extracellular Matrix è il nome del prodotto al di fuori degli Stati Uniti.

3 settimane



## Trattamento:

**3 settimane:** applicazione settimanale continuata di OASIS<sup>®</sup> Wound Matrix e coperta con Mepilex<sup>®</sup> Ag Foam Dressing e Profore<sup>®</sup> Multi-Layer Compression Wrap.

5 settimane



**5 settimane:** applicazione settimanale continuata di OASIS e ricoperta con Mepilex Ag Foam Dressing e Profore Multi-Layer Compression Wrap.

Mepilex è un marchio registrato di Mölnlycke Health Care AB.  
Profore è un marchio registrato di Smith & Nephew.

Nota: i risultati individuali possono variare.  
OASIS Wound Matrix è il nome del prodotto negli Stati Uniti.  
OASIS Extracellular Matrix è il nome del prodotto al di fuori degli Stati Uniti.

8 settimane



## Trattamento:

**8 settimane:** ferita quasi chiusa. Passaggio a Mepilex<sup>®</sup> Border Foam Dressing per proteggere la ferita. Alla paziente è stato prescritto di indossare una calza elastica compressiva per una leggera compressione.

## Risultati:

Ferita completamente chiusa. Cicatrici minime. Paziente in grado di deambulare normalmente senza dolore. La combinazione di V.A.C.<sup>®</sup> Therapy e OASIS<sup>®</sup> Wound Matrix è stata efficace nel trattamento di questa grande ferita traumatica.

3 mesi



Mepilex è un marchio registrato di Mölnlycke Health Care AB.

Nota: i risultati individuali possono variare.

OASIS Wound Matrix è il nome del prodotto negli Stati Uniti.

OASIS Extracellular Matrix è il nome del prodotto al di fuori degli Stati Uniti.