

Fallstudie: Verbrennung zweiten Grades im Brustbereich

OASIS[®]
EXTRACELLULAR MATRIX

Patient	18 Monate alt
Vorstellung	Vorgestellt mit Verbrennungen zweiten Grades durch Kaffee auf Brust und Bauch
Behandlungsverlauf	<ul style="list-style-type: none">• 4 Tage lang mit feuchten Verbänden behandelt, täglich gewechselt• Starke Schmerzen mit Morphinum kontrolliert

Anmerkung: Individuelle Ergebnisse variieren.

Behandlung:

- 5 Tage nach der Verletzung wird die Wunde von nicht lebensfähigem Gewebe gereinigt
- OASIS[®] Burn Matrix angewendet; nicht haftende Abdeckung mit Mepitel[®], darauf Gaze und ein Netzverband zur Fixierung



5 Tage nach der Verbrennung, vor OASIS-Anwendung



Nach OASIS-Anwendung

Mepitel ist eine eingetragene Marke von Mölnlycke Health Care AB.


Anmerkung: Individuelle Ergebnisse variieren.

OASIS Burn Matrix ist der Produktname in den USA.


OASIS Extracellular Matrix ist der Produktname in der EU.

Ergebnisse:

- Nur die Gaze und die äußere Abdeckung ersetzen, jedoch Mepitel® an Ort und Stelle belassen
- Nach 6 Tagen fiel OASIS® Burn Matrix von selbst ab, und verbleibendes OASIS wurde entfernt
- Unterliegende Haut rot, aber gut und komplikationslos heilend

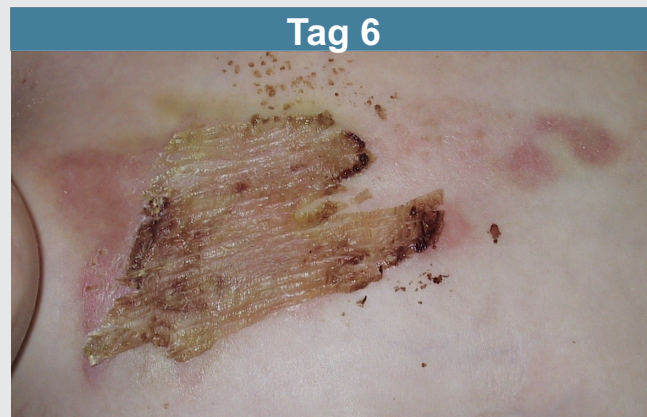

Tag 6
OASIS begann zu trocknen

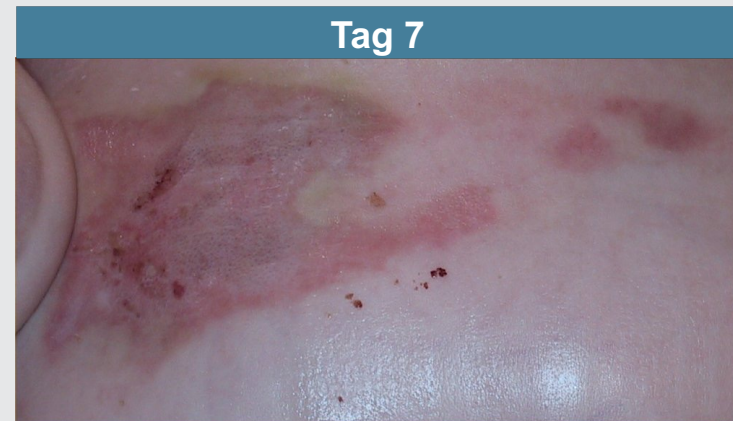

Tag 7
Trockenes OASIS entfernt

Mepitel ist eine eingetragene Marke von Mölnlycke Health Care AB.

Anmerkung: Individuelle Ergebnisse variieren.

OASIS Burn Matrix ist der Produktname in den USA.

OASIS Extracellular Matrix ist der Produktname in der EU.

Nachkontrolle:

- 30 Tage und 1 Jahr nach Anwendung von OASIS® Burn Matrix



Rötung reduziert



Rötung verschwunden

Anmerkung: Individuelle Ergebnisse variieren.
OASIS Burn Matrix ist der Produktname in den USA.
OASIS Extracellular Matrix ist der Produktname in der EU.