

Studio del caso: ustione al torace di secondo grado

OASIS[®]
EXTRACELLULAR MATRIX

Paziente	18 mesi
Presentazione	Arrivato con ustioni di secondo grado da caffè sul torace e sull'addome
Trattamento Cronologia	<ul style="list-style-type: none">• Trattato per 4 giorni con medicazioni umide sostituite ogni giorno• Forte dolore controllato con la morfina

Nota: i risultati individuali possono variare.

Trattamento:

- 5 giorni dopo l'infortunio, ferita sbrigliata del tessuto non vitale
- OASIS[®] Burn Matrix applicata e coperta con Mepitel[®], una medicazione non aderente, seguita da garza e benda a rete per tenerla in posizione

Giorno 0 (pre-OASIS)



5 giorni dopo l'ustione, prima dell'applicazione di OASIS

Giorno 0 (post-OASIS)



Dopo l'applicazione di OASIS

Mepitel è un marchio registrato di Mölnlycke Health Care AB.

Nota: i risultati individuali possono variare.

OASIS Burn Matrix è il nome del prodotto negli Stati Uniti.

OASIS Extracellular Matrix è il nome del prodotto nell'UE.

Risultati:

- Sostituite solo la garza e la copertura esterna lasciando Mepitel[®] in posizione
- Dopo 6 giorni, OASIS[®] Burn Matrix è caduta da sola e rimanendo allentata OASIS è stata rimossa
- Pelle sottostante rossa, ma in fase di guarigione senza complicazioni



OASIS ha iniziato ad asciugarsi



OASIS asciutta rimossa

Mepitel è un marchio registrato di Mölnlycke Health Care AB.

Nota: i risultati individuali possono variare.

OASIS Burn Matrix è il nome del prodotto negli Stati Uniti.

OASIS Extracellular Matrix è il nome del prodotto nell'UE.

Azione supplementare:

- 30 giorni e 1 anno dopo l'applicazione di OASIS[®] Burn Matrix



Giorno 30

Rossore ridotto



1 anno

Rossore scomparso

Nota: i risultati individuali possono variare.
OASIS Burn Matrix è il nome del prodotto negli Stati Uniti.
OASIS Extracellular Matrix è il nome del prodotto nell'UE.